



Variolink[®] Veneer


COMPOSITE DE COLLAGE ESTHÉTIQUE


ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

Choix de luminosité

Variolink Veneer est un matériau photopolymérisable, proposé en sept teintes classées en fonction de leur luminosité ("value"). La teinte "Medium Value" (MV 0) est très translucide, et n'influence que très peu l'aspect final de la restauration. Les teintes "High Value" permettent au praticien de rendre la restauration plus éclatante, ou plus lumineuse, tandis que les teintes "Low Value" tendent à "réchauffer" la teinte globale de la restauration. Ainsi est parachevée l'esthétique de la restauration finale.

Les matériaux Variolink Veneer ne contiennent pas d'amines autopolymérisantes, ce qui leur procure une très grande stabilité de teinte et garantit le résultat esthétique à long terme.

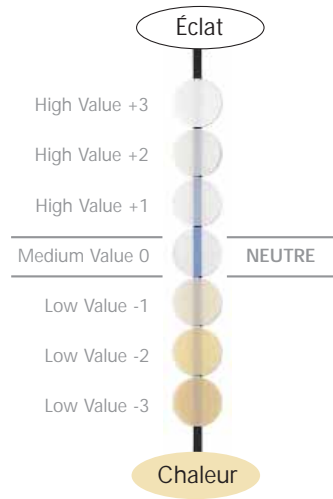

Propre et net

Variolink Veneer est un matériau dont les excédents se retirent très facilement pendant la phase de collage. Plus de grattage ou de fraisage, ni de nettoyage fastidieux. Il suffit de remplir l'intrados de la restauration, de la positionner, de photopolymériser et de détacher les excédents. Variolink Veneer associe la fiabilité d'un matériau adhésif à la facilité de retrait des excédents d'un ciment conventionnel.




Clichés cliniques reproduits avec la permission de Dr. David Hornbrook

Propriétés physiques


La formule micro-chargée de Variolink Veneer procure des avantages essentiels tels que faible abrasion, translucidité élevée, polissage optimal, et fortes valeurs d'adhésion. Variolink Veneer présente un taux d'abrasion très inférieur à celui d'autres composites de collage du marché, assurant le succès clinique à long terme de vos restaurations esthétiques.

TRANSLUCIDITÉ

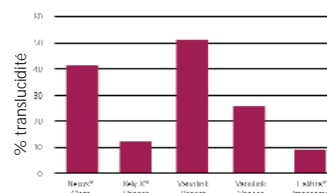

* Ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent, Inc. 2003, R&D Ivoclar Vivadent, Inc.

ABRASION

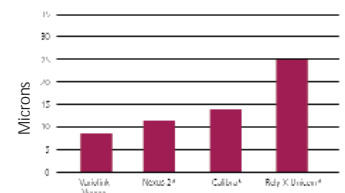

* Ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent, Inc. UAB School of Dentistry, Octobre 2003. Shiro Suzuki, DDS, PhD, FAD, Professor of Dentistry, Director of Clinical Research, Department of Prosthodontics and Biomaterials

PRÉSENTATION

Assortiment / Syntac

- 7 seringues Variolink Veneer, 1,5 ml chacune, en 7 teintes
- 7 seringues Variolink Veneer Try-In, 1,5 ml chacune, en 7 teintes
- 1 flacon Monobond S, 5 g
- 1 seringue Liquid Strip, 2,5 g
- 1 seringue Total Etch, 2 g
- 1 flacon Syntac Primer, 3 g
- 1 flacon Syntac Adhesive, 3 g
- 1 flacon Heliobond, 6 g
- Accessoires



Assortiment / Excite

- 7 seringues Variolink Veneer, 1,5 ml chacune, en 7 teintes
- 7 seringues Variolink Veneer Try-In, 1,5 ml chacune, en 7 teintes
- 1 flacon Monobond S, 5 g
- 1 seringue Liquid Strip, 2,5 g
- 1 seringue Total Etch, 2 g
- 12 unidoses Excite, 0,1 g chacune
- Accessoires



Refills / Variolink Veneer

- 1 seringue Variolink Veneer 1,5 ml, disponible dans chacune des teintes



Refills / Variolink Veneer Try-In

- 1 seringue Variolink Veneer Try-In 1,5 ml, disponible dans chacune des teintes



www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent SAS Clinical

BP 118 | 74410 Saint-Jorioz | France | Tél. : 04 50 88 64 00 | Fax : 04 50 68 91 52

Les descriptions et les données fournies ne sont pas contractuelles et n'engagent pas la responsabilité du fabricant.

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation