



# Précision, Rigidité, Prise rapide : le matériau idéal

JET BLUE® Bite fast / superfast, avec sa consistance crèmeuse, reste exactement là où vous le déposez. Les embouts bec-de-canard spécifiques vous permettent d'appliquer précisément un ruban régulier de matériau. Son temps de prise rapide, sa dureté finale élevée, garantissent la précision de vos enregis-

trements. Le réglage et la découpe des clés occlusales sont facilités par son élasticité résiduelle. Ces caractéristiques exceptionnelles garantissent une intégration occlusale parfaite de vos restaurations, sans ajustements laborieux.

## Application clinique de JET BLUE® Bite fast



Illustration clinique

Application directe de Jet Blue Bite fast avec l'embout bec-de-canard

Temps de prise idéal

Enregistrement de l'occlusion

Enregistrement occlusal terminé



Découpage aisé des excès



Ajustement final facile



Les accessoires indispensables : l'embout bec-de-canard unique délivre un ruban de matériau de largeur et d'épaisseur régulières

Essayez JET BLUE® Bite en cartouches microSystem™ de 25ml. 38% d'économie de matériau dans les embouts mélangeurs !



JET BLUE® Bite	Temps de travail	Temps de prise intra-oral	Dureté finale	Stabilité dimensionnelle (%)
JET BLUE® Bite fast	max. 30 s	min. 40 s	89 Shore A	-0,08%
JET BLUE® Bite superfast	max. 20 s	min. 30 s	89 Shore A	-0,12%

Données internes

JET BLUE® Bite fast microSystem™ Single Pack	6492
Cartouches	2 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	10 pièces.
Embouts applicateurs plats	10 pièces.
JET BLUE® Bite fast microSystem™ Réassort	6496
Cartouches	8 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	20 pièces.
Embouts applicateurs plats	20 pièces.
JET BLUE® Bite fast 50 ml Single Pack	6491
Cartouche	1 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	6 pièces.
Embouts applicateurs plats	6 pièces.
JET BLUE® Bite fast 50 ml Réassort	6495
Cartouches	4 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	12 pièces.
Embouts applicateurs plats	12 pièces.

JET BLUE® Bite superfast microSystem™ Single Pack	6494
Cartouches	2 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	10 pièces.
Embouts applicateurs plats	10 pièces.
JET BLUE® Bite superfast microSystem™ Réassort	6498
Cartouches	8 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	20 pièces.
Embouts applicateurs plats	20 pièces.
JET BLUE® Bite superfast 50 ml Single Pack	6493
Cartouche	1 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	6 pièces.
Embouts applicateurs plats	6 pièces.
JET BLUE® Bite superfast 50 ml Réassort	6497
Cartouches	4 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	12 pièces.
Embouts applicateurs plats	12 pièces.

Accessoires JET BLUE® Bite microSystem™		
Embouts mélangeurs neutral	40 pièces.	6214
Embouts mélangeurs neutral	100 pièces.	6215
Embouts applicateurs plats	100 pièces.	6223
Pistolet microSystem™ MK II	1 pièce.	6270

Accessoires JET BLUE® Bite 50 ml System		
Embouts mélangeurs pink/medium	40 pièces.	6551
Embouts applicateurs plats	100 pièces.	6223
Pistolet 50/75	1 pièce.	6900

www.coltenewhaledent.com  
© 2006 Coltène/Whaledent AG

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
Tel. +41 (0)71 757 53 00  
Fax +41 (0)71 757 53 01  
office@coltenewhaledent.ch

**Coltène/Whaledent S.à.r.l.**  
19 Boulevard Alexandre Oyon  
72058 Le Mans Cedex 2/France  
Tél. +33 (0)2 43 39 30 30  
Fax +33 (0)2 43 39 30 40  
cw@coltenewhaledent.fr

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA  
Tel. +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
productinfo@coltenewhaledent.com

**coltène**  
**whaledent®**